

Utskickat	2021-08-25
Sista analysdag	2021-09-01
Sista svarsdag	2021-09-02

Programkoordinator Jim Andersson
Telefon, E-post 018-490 31 00, info@equalis.se

Provmaterial

Benämning Equalis | Art. Nr: 12 | 2021:07
Beskrivning Helblod med tillsats av K2_EDTA
Förvaring Efter ankomst förvaring i kylskåp, +2 till +8 °C
Smittrisk HIV-antikroppar: Negativ
HIV-antigen: Negativ
HBs-antigen: Negativ
HCV-antikroppar: Negativ
Smittestningen är utförd på poolat patientblod.
Materialet bör av säkerhetsskäl alltid behandlas som ett okänt patientprov.

Ingående komponenter

I tabellen på sista sidan presenteras samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet, där framgår även aktuell NPU-kod där tillämpligt. Kontrollera gärna att ni använder er av korrekt NPU-kod. I tabellen finns även utrymme att göra egna anteckningar vid analys.

Utförande av analys

Låt provet få rumstemperatur
Blanda provet noga, men försiktigt, minst 20 ggr före analys.
Provmaterial ska i så stor utsträckning som möjligt hanteras som ett patientprov.

Endast till er som deltar med filterpapper:

Analysera provet med laboratoriets egen teknik för filterpapper.
Provmaterialet ska i så stor utsträckning som möjligt hanteras som ett patientprov.

Registrering av resultat

Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt.
Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Lotnummer

Vänligen registrera lotnumret för det reagens/testkit som har använts vid analysen.
Informationen lämnas i avsett fält på Equalis Online. För Abbott Afinion ska lotnumret som står skrivet på testkassetten anges.

Metoduppgifter

Kontrollera att informationen om er instrumentmodell är korrekt, om inte ändra dem på Equalis Online eller meddela Equalis på annat sätt.

Åtterrapporing

Rapport med resultatsammanställning beräknas vara deltagarna tillhanda inom en månad från sista svarsdag.

Komponent*	NPU-kod	Förkortad nomenklatur enl. IUPAC/IFCC	Egen anteckning/ Resultat**
B—HbA1c (IFCC)	NPU27300	Hemoglobin betakedja(Blod)—N-(1-deoxifruktos-1-yl)hemoglobin betakedja;substansfraktion	

* Samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet

** Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt. Vi ber er registrera lotnumret för ert reagens/testkit i avsett fält på Equalis Online. Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Labkod: _____

Instrument: _____

Analysdatum: _____