

Utskickat	2021-11-16
Sista analysdag	2021-11-18
Sista svarsdag	2021-11-24

Programkoordinator Emilia Svala
 Telefon, E-post 018-490 31 61, emilia.svala@equalis.se

Provmaterial

Benämning Equalis | Art. Nr. 179 | 2021:06/A och 2021:06/B

Beskrivning Poolad plasma som varit fryst

Förvaring Efter ankomst i kylskåp, +2 till +8 °C

Smittrisk HIV-antikroppar: Negativ
 HIV-antigen: Negativ
 HBs-antigen: Negativ
 HCV-antikroppar: Negativ
 Smittestningen är utförd på poolade patientprover.
 Materialet bör av säkerhetsskäl alltid behandlas som ett okänt patientprov.

Hållbarhet Analysen kan utföras trots förvaring i rumstemperatur vid sen ankomst av posten fram till sista analysdag.

Ingående komponenter

I tabellen på sista sidan presenteras samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet, där framgår även aktuell NPU-kod där tillämpligt. Kontrollera gärna att ni använder er av korrekt NPU-kod. I tabellen finns även utrymme att göra egna anteckningar vid analys.

Utförande av analys

Efter det att provet uppnått rumstemperatur blandas det försiktigt 10 minuter på vagga eller manuellt genom att vända röret minst 20 gånger. Undvik skumbildning. Provmaterialet ska i så stor utsträckning som möjligt hanteras som ett patientprov.

Registrering av resultat

Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om det är möjligt. Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Metoduppgifter

Kontrollera gärna så instrumentuppgifterna stämmer och ändra vid behov.

Återrapportering

Rapport med resultatsammanställning beräknas vara deltagarna tillhanda inom en månad från sista svarsdag.

Komponent*	NPU-kod	Förkortad nomenklatur enl. IUPAC/IFCC	Egna anteckningar/ Resultat**	
			/A	/B
P—PSA (µg/L)	NPU08669	P—Prostataspecifikt antigen;masskonc		
	NPU54037	P—Prostataspecifikt antigen;masskonc (IS 96/670;proc)		
	NPU58639	P—Prostataspecifikt antigen;masskonc (IS 17/100;proc)		
P—PSA fritt (µg/L)	NPU12534	P—Prostataspecifikt antigen(fritt);masskonc		

* Samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet

** Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om det är möjligt. Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Labkod: _____

Instrument: _____

Analysdatum: _____