

Utskickat	2021-08-31
Sista analysdag	2021-09-07
Sista svarsdag	2021-09-08

Programkoordinator Carolina Kristoffersson
Telefon, E-post 018-490 31 00, info@equalis.se

Provmaterial

Benämning Equalis | Art. Nr: 3 | 2021:04/CRP och 2021:04/låg
Beskrivning /CRP: poolad plasma
/låg: poolat serum
Förvaring Efter ankomst i kylskåp, +2 till +8 °C
Smittrisk HIV-antikroppar: Negativ
HIV-antigen: Negativ
HBs-antigen: Negativ
HCV-antikroppar: Negativ
Smittestningen är utförd på poolade patientprover.
Materialet bör av säkerhetsskäl ändå behandlas som ett patientprov

Ingående komponenter

I tabellen på sista sidan presenteras samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet, där framgår även aktuell NPU-kod där tillämpligt. Kontrollera gärna att ni använder er av korrekt NPU-kod. I tabellen finns även utrymme att göra egna anteckningar vid analys.

Utförande av analys

Låt provet få rumstemperatur före analys.
Blanda provet minst 20 ggr manuellt eller minst 5 minuter på vagga.
Provmaterialet ska i så stor utsträckning som möjligt hanteras som ett patientprov.

Registrering av resultat

Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt.
Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Metoduppgifter

Kontrollera att metoduppgifterna stämmer. Ändringar kan göras på Equalis Online.

Åtterrapporing

Rapport med resultatsammanställning beräknas vara deltagarna tillhanda inom en månad från sista svarsdag.

Komponent*	NPU-kod	Förkortad nomenklatur enl. IUPAC/IFCC	Egna anteckningar/ Resultat**	
			/CRP	/Låg
P—CRP (mg/L)	NPU19748	P—C-reaktivt protein;masskonc		

* Samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet

** Resultaten registreras [via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt. Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Labkod: _____

Instrument: _____

Analysdatum: _____