

Utskickat	2021-01-25
Sista analysdag	2021-01-29
Sista svarsdag	2021-02-01

Programkoordinator Carolina Kristoffersson
Telefon, E-post 018-490 31 63, carolina.kristoffersson@equalis.se

Provmaterial

Benämning Equalis | Art. Nr: 306 | 2021:01/A och 2021:01/B
Beskrivning Poolad plasma
Förvaring Förvaras i kylskåp +2-8°C vid ankomst, alt. frys -20°C om analysen inte kan utföras ankomstdagen.
Smittrisk HIV-antikroppar: Negativ
 HIV-antigen: Negativ
 HBs-antigen: Negativ
 HCV-antikroppar: Negativ
 Smittestningen är utförd på poolade patientprover.
Hållbarhet Materialet bör av säkerhetsskäl alltid behandlas som ett okänt patientprov
 Provet bör analyseras ankomstdagen. I annat fall ska provet förvaras fryst och analyseras senast 2021-01-29.

Utförande av Prokalcitonin

Låt provet få rumstemperatur före analys.
Blanda provet minst 20 ggr manuellt eller minst 5 minuter på vagga.
Provmaterialet ska i så stor utsträckning som möjligt hanteras som ett patientprov.

Registrering av resultat

Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt.
Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Metoduppgifter

Kontrollera att metoduppgifterna stämmer. Ändringar kan göras på Online.

Åtterrapporering

Rapport med resultatsammanställning beräknas vara deltagarna tillhanda inom en månad från sista svarsdag.