

		Utskickat	2021-10-19
		Sista analysdag	2021-10-21
		Sista svarsdag	2021-10-27
Programkoordinator	Emilia Svala		
Telefon, E-post	018-490 31 61, emilia.svala@equalis.se		

Provmaterial

Benämning	Equalis Art. Nr. 179 2021:05/A och 2021:05/B
Beskrivning	Poolad plasma som varit fryst
Förvaring	Efter ankomst i kylskåp, +2 till +8 °C
Smittrisk	HIV-antikroppar: Negativ HIV-antigen: Negativ HBs-antigen: Negativ HCV-antikroppar: Negativ Smittestningen är utförd på poolade patientprover. Materialet bör av säkerhetsskäl alltid behandlas som ett okänt patientprov.
Hållbarhet	Analysen kan utföras trots förvaring i rumstemperatur vid sen ankomst av posten fram till sista analysdag.

Ingående komponenter

I tabellen på sista sidan presenteras samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet, där framgår även aktuell NPU-kod där tillämpligt. Kontrollera gärna att ni använder er av korrekt NPU-kod. I tabellen finns även utrymme att göra egna anteckningar vid analys.

Utförande av analys

Efter det att provet uppnått rumstemperatur blandas det försiktigt 10 minuter på vagga eller manuellt genom att vända röret minst 20 gånger. Undvik skumbildning. Provmaterialet ska i så stor utsträckning som möjligt hanteras som ett patientprov.

Registrering av resultat

Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om det är möjligt. Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Metoduppgifter

Kontrollera gärna så instrumentuppgifterna stämmer och ändra vid behov.

Återrapportering

Rapport med resultatsammanställning beräknas vara deltagarna tillhanda inom en månad från sista svarsdag.

Komponent*	NPU-kod	Förkortad nomenklatur enl. IUPAC/IFCC	Egna anteckningar/ Resultat**	
			/A	/B
P—PSA (µg/L)	NPU08669	P—Prostataspecifikt antigen;masskonc		
	NPU54037	P—Prostataspecifikt antigen;masskonc (IS 96/670;proc)		
	NPU58639	P—Prostataspecifikt antigen;masskonc (IS 17/100;proc)		
P—PSA fritt (µg/L)	NPU12534	P—Prostataspecifikt antigen(fritt);masskonc		

* Samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet

** Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om det är möjligt. Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Labkod: _____

Instrument: _____

Analysdatum: _____