

Utskickat	2021-11-17
Sista analysdag	2021-11-24
Sista svarsdag	2021-11-25

Programkoordinator Jim Andersson  
Telefon, E-post 018-490 31 00, [info@equalis.se](mailto:info@equalis.se)

## Provmaterial

Benämning Equalis | Art. Nr: 12 | 2021:10  
Beskrivning Helblod med tillsats av K2\_EDTA  
Förvaring Efter ankomst förvaring i kylskåp, +2 till +8 °C  
Smittrisk HIV-antikroppar: Negativ  
HIV-antigen: Negativ  
HBs-antigen: Negativ  
HCV-antikroppar: Negativ  
Smittestningen är utförd på poolat patientblod.  
Materialet bör av säkerhetsskäl alltid behandlas som ett okänt patientprov.

## Ingående komponenter

I tabellen på sista sidan presenteras samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet, där framgår även aktuell NPU-kod där tillämpligt. Kontrollera gärna att ni använder er av korrekt NPU-kod. I tabellen finns även utrymme att göra egna anteckningar vid analys.

## Utförande av analys

Låt provet få rumstemperatur  
Blanda provet noga, men försiktigt, minst 20 ggr före analys.  
Provmaterial ska i så stor utsträckning som möjligt hanteras som ett patientprov.

### Endast till er som deltar med filterpapper:

Analysera provet med laboratoriets egen teknik för filterpapper.  
Provmaterialet ska i så stor utsträckning som möjligt hanteras som ett patientprov.

## Registrering av resultat

Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt.  
Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

### Lotnummer

Vänligen registrera lotnumret för det reagens/testkit som har använts vid analysen.  
Informationen lämnas i avsett fält på Equalis Online. För Abbott Afinion ska lotnumret som står skrivet på testkassetten anges.

## Metoduppgifter

Kontrollera att informationen om er instrumentmodell är korrekt, om inte ändra dem på Equalis Online eller meddela Equalis på annat sätt.

## Åtterrapporing

Rapport med resultatsammanställning beräknas vara deltagarna tillhanda inom en månad från sista svarsdag.

Komponent*	NPU-kod	Förkortad nomenklatur enl. IUPAC/IFCC	Egen anteckning/ Resultat**
B—HbA1c (IFCC)	NPU27300	Hemoglobin betakedja(Blod)—N-(1-deoxifruktos-1-yl)hemoglobin betakedja;substansfraktion	

\* Samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet

\*\* Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt. Vi ber er registrera lotnumret för ert reagens/testkit i avsett fält på Equalis Online. Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Labkod: \_\_\_\_\_

Instrument: \_\_\_\_\_

Analysdatum: \_\_\_\_\_