

Utskickat	2021-05-17
Sista analysdag	2021-05-21
Sista svarsdag	2021-05-24

Programkoordinator Carolina Kristoffersson
Telefon 018-490 31 63
E-post carolina.kristoffersson@equalis.se

Provmaterial

Benämning Equalis | Art. Nr: 306 | 2021:02/A och 2021:02/B
Beskrivning Poolad plasma
Förvaring Förvaras i kylskåp +2-8°C vid ankomst, alt. frys -20°C om analysen inte kan utföras ankomstdagen.
Smittrisk HIV-antikroppar: Negativ
HIV-antigen: Negativ
HBs-antigen: Negativ
HCV-antikroppar: Negativ
Smittestningen är utförd på poolade patientprover.
Materialet bör av säkerhetsskäl alltid behandlas som ett okänt patientprov
Hållbarhet Provet bör analyseras ankomstdagen. I annat fall ska provet förvaras fryst och analyseras senast 2021-05-21.

Ingående komponenter

I tabellen på sista sidan presenteras samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet. I tabellen finns även utrymme att göra egna anteckningar vid analys.

Utförande av analys

Låt provet få rumstemperatur före analys.
Blanda provet minst 20 ggr manuellt eller minst 5 minuter på vagga.
Provmaterialet ska i så stor utsträckning som möjligt hanteras som ett patientprov.

Registrering av resultat

Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt.
Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Metoduppgifter

Kontrollera att metoduppgifterna stämmer. Ändringar kan göras på Online.

Åtterrapporing

Rapport med resultatsammanställning beräknas vara deltagarna tillhanda inom en månad från sista svarsdag.

Komponent*	Egna anteckningar/ Resultat**	
	/A	/B
P—Prokalcitonin (µg/L)		
P—Prokalcitonin, semikvantitativ (µg/L)		

* Samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet

** Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt. Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Labkod: _____

Instrument: _____

Analysdatum: _____